



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Diatermia chirurgiczna SURTRON 400 HP (Produkt nowy)**

- Nowa,
- Produkcji włoskiej,
- Urządzenie do elektrochirurgii dwubiegunowej o wysokiej mocy
- Możliwość kontroli obwodu pacjenta; mocy; niestabilności sieci; przepływu HF,
- **Posiada:**
  - Dużą moc wyjściową,
  - 4 tryby cięcia,
  - 3 tryby koagulacji monopolarnej,
  - Cięcie i koagulację bipolarną,
- **Zastosowanie:**
  - Otolaryngologia,
  - Weterynaria,
  - Chirurgia Naczyniowa,
  - Urologia,
  - Operacje Pediatriczne,
  - Operacje Plastyczne,
  - przy Endoskopiach,
  - Pulmonologia,
  - Neurochirurgia,
  - Operacje Ogólne,
  - Dermatologia,
  - Ginekologia,
  - Stomatologia,
  - Podiatria,
- **Wyposażenie:**
  - Jednorazowe uchwyty z przyciskami (5 szt.),
  - Wielorazowy uchwyt z przyciskami (1 szt.),
  - Krótkie elektrody - ostrza (3 szt.),
  - Długie elektrody - ostrza (3 szt.),
  - Elektrody igłowe krótkie (3 szt.),
  - Jednorazowe elektrody kulkowe krótkie (3 szt.),
  - Kabel do elektrody neutralnej (1 szt.),
  - Jednorazowe podwójne elektrody neutralne (5 szt.),
  - Gąbka do czyszczenia elektrody (1 szt.),
  - Podwójny sterownik nożny wodoszczelny (2 szt.),
  - Przewód zasilający 5 m (1 szt.),
- **Tryby cięcia:**
  - **Cięcie zwykłe**, dwa stopnie cięcia koagulującego oraz cięcie w trudnych warunkach (środowisko wodne). Aparat umożliwia wykonanie procedury TUR.
  - **Koagulacja miękka, forsowna i natryskowa:**
    - Tryb **koagulacji miękkiej** ogranicza karbonizację i zmniejsza zużycie narzędzi.
    - **Koagulacja forsowna** o dużej mocy umożliwia skuteczne i wydajne koagulowanie tkanki.
    - **Koagulacja natryskowa** (spray) umożliwia szybkie, bezdotykowe koagulowanie dużych powierzchni bez zjawiska adhezji - przyklejania tkanki do elektrody.
  - **Koagulacja bipolarna:** Konstrukcja obwodu bipolarnego umożliwia koagulację bez niepożądanych efektów cięcia czy koagulacji forsownej. Niskie napięcie obwodu wyjściowego, pomimo dużej mocy, ograniczają klejenie się tkanki do narzędzi.
  - **Koagulacja argonowa:** Aparat jest przystosowany do podłączenia przystawki argonowej.
- **Dane techniczne:**
  - Częstotliwość pracy: monopolarna / bipolarna - 425 kHz / 525 kHz,
  - Elektroda bierna - F,
  - Moc do wyboru - 115-230V,
  - Częstotliwość sieci - 56-60Hz,
  - Maksymalny pobór mocy - 1000VA,
  - Ciężar - 17,5kg,
  - Wymiary urządzenia SxWxG470x150x400mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,

